



## BEDIENUNGSANLEITUNG

### PRODUKTINFORMATIONEN

Für die gängigsten Stockmodelle geeignet  
Ø 20-22,6 mm.

Gewicht 60 g  
Länge 12 cm

Die Packung enthält zwei (2) völlig identische Teile, welche den XCLIP bilden, wenn sie über Kreuz am Stock der Unterarmgehstützen befestigt werden. Entfernen Sie das Montageband nicht vor der Montage!

### MONTAGE DES XCLIPS

1. Der XCLIP wird oberhalb der Längen-Einstelllöcher auf der glatten Fläche montiert.
  2. Entfernen Sie eventuell auf der Unterarmgehstütze befindlichen Schmutz gründlich.
  3. Setzen Sie sich auf einen Stuhl und legen Sie eine Unterarmgehstütze quer über Ihre Knie.
  4. Montieren Sie die eine Hälfte des XCLIPs auf die Oberseite des Stocks und drücken Sie sie gut auf dem Stock an.
  5. Drehen Sie die zweite Hälfte auf der Unterseite des Stocks, wobei das Flügelement von Ihnen weggedreht sein muss.
  6. Verbinden Sie zuerst die **rot** markierten Flügelhälften: drücken Sie mit beiden Händen kräftig auf die **rot** markierte Stelle. Wiederholen Sie denselben Vorgang an der **rot** markierten Stelle auch am anderen Ende. Drehen Sie die Unterarmgehstütze auf Wunsch um.
  7. Verschließen Sie danach die Clips an den **grünen** Markierungen, indem Sie gleichermaßen kräftig darauf drücken.
  8. Stellen Sie abschließend sicher, dass alle vier Verbindungsclips eingerastet sind und dass sich zwischen den Teilen kein Spalt befindet. Entfernen Sie die Montageetiketten - der XCLIP ist jetzt einsatzbereit!
- Reicht die Presskraft Ihrer Hände nicht aus, **können Sie die auf der Innenseite befindlichen Dichtungen mit einem Föhn erwärmen ODER mit Seife einreiben**, damit sie besser gleiten. Sie können auch ein Werkzeug zum Befestigen verwenden (z.B. eine Greifzange).
- Beachten Sie, dass die Befestigung des XCLIPs so konstruiert ist, dass die Unterarmgehstütze im XCLIP gedreht werden kann. Erschrecken Sie daher nicht, wenn sich der XCLIP leicht auf dem Stock drehen lässt! Das Drehen der Gehilfe ermöglicht u.a. die Fortbewegung im Treppenhaus \*).

### BETRIEBSBEDINGUNGEN

-15 ° C bis +35 ° C,  
bei extremen Temperaturen und  
Temperaturschwankungen mit  
Vorsicht anwenden.

### BEFESTIGEN DER UNTERARMGEHSTÜTZE AM XCLIP

1. Stellen Sie sicher, dass die Flügel des XCLIPs zum Griff der Unterarmgehstütze hin ausgerichtet sind.
  2. Nehmen Sie die Unterarmgehstütze mit der bereits befestigten Halterung in die rechte Hand und die Gehilfe ohne Clip in die linke Hand.
  3. Sie können die Unterarmgehstütze wie beim Gehen am Griff festhalten  
ODER  
Sie greifen die Gehilfe mit den Händen oberhalb des Griffes der Unterarmgehstütze, wie auf der Abbildung dargestellt.
  4. **WICHTIG:** Halten Sie die Griffe gerade nach vorne oder etwas voneinander nach außen ausgerichtet.
  5. Halten Sie die Unterarmgehstütze, die sich in Ihrer rechten Hand befindet, fest. Setzen Sie die linke Gehilfe in der auf der rechten Gehilfe befindlichen Halterung ein (Stelle und Höhe, wo sich die Halterung auf der anderen Gehilfe befindet, müssen übereinstimmen).
  6. Danach können die Gehilfen an einen Stuhl/Tisch/eine Wand oder aneinander gelehnt werden.
- **ACHTUNG:** etwas Übung und das Ansehen der Videos wird Ihnen helfen, den vollen Nutzen aus dem XCLIP zu ziehen \*)

### Die Unterarmgehstütze vom XCLIP lösen

1. Drücken Sie die Griffe leicht zusammen, hierdurch wird die linke Gehilfe aus der Halterung freigegeben.

### ENTFERNEN DER XCLIP-HALTERUNG VON DER UNTERARMGEHSTÜTZE

Drücken Sie die Verbindungsclips neben dem Flügelteil z.B. mit einem Schlitzschraubendreher oder einem unterstützenden Schlüssel, sodass sie aus der Verbindung freigegeben werden.



\*) Hier finden Sie Videos zur Erklärung der Nutzung des XCLIPs:

[www.olecranon.fi/en/xclip](http://www.olecranon.fi/en/xclip)



OlecranonOy



#XCLIP\_4crutches